

8



8. Fold the outlet twice – until you see the velour plate.

9



9. Seal the outlet by folding the hook (Velcro) ears onto the velour plate and press firmly.

For some product version you can, if desired, fold once more as described under "Cosmetic closing of the Outlet" (point 15). These product versions aren't available in all countries.

10



10. Opening of pouch
Take hold of the end of the hook (Velcro) ears. Lift both hook (Velcro) ears off the velour plate. Unfold the outlet in the position where you want to empty the pouch.

11



11. Emptying of the pouch
Allow the contents to run out while you control the emptying with your fingers.

12



12. Cleaning of the outlet
Use a tissue or dry wipe to clean the outlet in one sliding movement away from your body.

13



13. Fold the small plate backwards so that only the large plate is visible. You can now clean the edge. The outlet is now cleaned and ready to be closed again.

14



14. Re-closing of the outlet
Bend the lower small plate over the upper large plate. Then fold the outlet twice – until you see the velour plate. Seal the outlet by folding the hook (Velcro) ears onto the velour plate and press firmly.

15



15. Cosmetic closing of the outlet (only for some product versions)
The whole closing system can be folded up under the soft cover and attached to the Velcro dot. The pouch will now become more discreet.



Avertissement

Toute réutilisation de ce produit à usage unique peut présenter un risque pour l'utilisateur. Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de nocivité physique ou d'infection pour le patient.

Mise en garde

Il est recommandé de consulter l'infirmière ou le médecin stomathérapeute avant d'utiliser les produits Convex Light/Soft Seal.

Coloplast décline toute responsabilité pour les blessures ou pertes résultant de l'utilisation de ce produit de manière contraire aux recommandations actuelles de Coloplast.

Introduction

La poche et la plaque adhésive pour stomies SenSura ont été conçues pour collecter les effluents qui sortent de la stomie. Prévue pour adhérer parfaitement à la peau péristomiale intacte, la plaque adhésive Sensura permet d'assurer le positionnement des poches de stomie.

Plaque unique composée de deux gommes adhésives
Grâce au système unique à deux gommes de SenSura, la plaque adhésive garantit discrétion et sécurité optimales. Elle préserve la peau et permet une totale liberté de mouvement sans compromettre l'adhérence, tout en gardant la peau sous l'adhésif sèche et saine par absorption de l'excès d'humidité.

Raccordement rapide
Le verrouillage correct du raccord est confirmé par un clic.

Filtres et étiquettes pour filtre
Le ou les filtres augmentent le passage de l'air, ce qui neutralise efficacement les odeurs, garantissant ainsi une plus grande discrétion. Chaque kit contient des pré-filtres. Pour prévenir toute fuite de gaz ou avant de se baigner ou de nager, il suffit d'appliquer une protection sur l'ouverture du filtre.

Pré-filtre souple
Constitué de tissu renforcé, le pré-filtre souple présente des propriétés hydrofuges.

Pour Convex Light/Soft Seal uniquement
Les produits Convex Light ont été conçus pour les patients présentant une stomie à ras de la peau, une stomie rétractée (profonde) ou une stomie au niveau de plis cutanés. Le système contient une ceinture avec fixation des deux côtés.

Utilisation des poches vidables et fermées

1. Découpe
Reportez la taille et la forme de la stomie sur le guide prévu à cet effet. Découpez le trou pour qu'il corresponde à la forme et à la taille de la stomie. Pour réduire le risque de fuite et de problèmes de peau, il est primordial de faire correspondre parfaitement le trou de l'adhésif et la stomie. La découpe est plus facile si vous utilisez une paire de ciseaux courbés. Veillez à ce que la peau soit parfaitement propre et sèche avant de positionner la plaque de base.

2. Retrait du film protecteur
Pour retirer le film protecteur, posez le pouce sur la languette blanche de l'adhésif tout en tirant sur la languette bleue de préhension.

3. Pose de la plaque de base
Pour que l'adéquation soit parfaite, appuyez fermement contre la peau en commençant par le bas et en lissant vers le haut avec les doigts.

4. Pose de la poche
Veillez à ce que la pochette de fixation soit ouverte. Appuyez simultanément sur la poche et la plaque de base en commençant par le bas. Veillez à ce que la poche soit correctement positionnée sur le raccordement. La poche peut être tournée pour atteindre une position idéale.

5. Verrouillage du raccordement
Fermez la pochette de fixation. Le clic signifie que la poche est correctement verrouillée sur la plaque de base.

6. Retrait de la poche et de la plaque de base
Poche :
1. Ouvrez la pochette de fixation en appuyant sur le petit rabat du bout du doigt.
2. Tenez la partie supérieure de la poche. Retirez la poche en l'écartant de la plaque de base.
Plaque de base :
3. Saisissez la languette blanche de retrait et tirez-la lentement vers le bas.

Utilisation des poches vidables avec sortie Hide-away/Easyclose

Refermez l'orifice de sortie avant utilisation.
7. Disposez la poche sur une table ou une surface plane en veillant à orienter le raccordement vers le bas. Repliez la partie basse vers le haut et fermez l'orifice de vidange comme une enveloppe.

8. Pliez deux fois l'orifice de sortie jusqu'à visualiser l'empreinte de fermeture en velours.

9. Pour assurer l'étanchéité de l'orifice de sortie, rabattez les œillets du clamp (Velcro) sur l'empreinte de fermeture en velours et exercez une pression ferme.

Vous pouvez plier certaines versions du produit une fois de plus si vous le souhaitez, selon la description « Fermeture esthétique de l'orifice de vidange » (paragraphe 15). Ces versions de produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

10. Ouverture de la poche
Saisissez l'extrémité des œillets du clamp (Velcro). Détachez les deux œillets du clamp (Velcro) de l'empreinte de fermeture en velours en les soulevant. Dépliez l'orifice de sortie en le ramenant à la position souhaitée pour vider la poche.

11. Vidange de la poche
Laissez le contenu s'évacuer tout en contrôlant la vidange du bout des doigts.

12. Nettoyage de l'embout d'écoulement
Utilisez un mouchoir ou un chiffon sec pour nettoyer l'embout d'évacuation d'un seul mouvement en le tenant à l'écart du corps.

13. Repliez la petite plaque vers l'arrière de façon à ce que seule la grande plaque demeure visible. Procédez ensuite au nettoyage du bord. L'orifice de sortie est maintenant propre et prêt à être refermé.

14. Refermeture de l'orifice de sortie
Ramenez la petite plaque inférieure sur la grande plaque supérieure. Pliez ensuite deux fois l'orifice de sortie jusqu'à visualiser l'empreinte de fermeture en velours. Pour assurer l'étanchéité de l'orifice de sortie, rabattez les œillets du clamp (Velcro) sur l'empreinte de fermeture en velours et exercez une pression ferme.

15. Fermeture esthétique de l'orifice de vidange (pour certaines versions de produits seulement)
L'ensemble du système de fermeture peut être replié sous le pré-filtre souple et fixé sur le point Velcro. La poche est ainsi plus discrète.